




## NOTICE D'UTILISATION DES CASSETTES A BIOPSIE

*Les microcassettes sont adaptées aux biopsies digestives, hépatiques, rénales, bronchiques, nasales... Elles permettent de limiter la fragmentation des biopsies fragiles durant le transport (biopsies hépatiques, rénales). Elles permettent également, du fait de leur compartimentation, une identification du site de prélèvement (masse gastrique/estomac alésionnel, rein droit/rein gauche).*

**1- Déposer les biopsies dans la cassette en les séparant bien les unes des autres, sans dépasser 2 biopsies par compartiment.** Pour éviter que les biopsies ne se dessèchent et collent au fond de la cassette, il est possible de remplir la cassette de sérum physiologique avant la dépose des biopsies. Ne pas mettre plus de **12 biopsies par cassette** pour les biopsies gastro-intestinales

**2- L'identification** des compartiments se fait de la manière suivante :

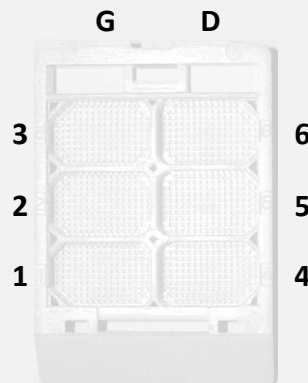

Biseau pour l'identification (nom, site de prélèvement...)

**Ecrire au crayon à papier**

**3- Une fois la cassette pleine, la plonger rapidement** dans un pot de **formol à 4%**. Il est possible de mettre plusieurs cassettes par pot.

**4- Joindre une feuille de commémoratifs** précisant le site de prélèvement pour chaque cassette réalisée, le site de chaque compartiment et le nombre de prélèvement par cassette/compartiment

Envoyez le flacon comme indiqué dans le document **Expédition des Prélèvements**

**NB : L'emploi de film radiologique ou de mousses est déconseillé car les biopsies collées sur ces films ou écrasées par ces mousses présentent des artéfacts importants.**